

## 小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150 点検表

お客様	勝田台フルヤ選科	製造番号	点検実施日	承認印
住所	千葉県佐倉市井野 1554-5	運転時間	点検実施者	

納入場所	サービス形態	時間	モリタ担当部署
		アムニーサービス(株) 小泉	

**ドア機能**

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛け・締め付け位置確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

**洗剤ポンプ**

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの壊れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の挿出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

**乾燥ユニット**

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

**配管系**

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

**ポンプ**

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

**洗浄槽**

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ペアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・漏れ

**電装系**

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター・端子の接続確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター記録の緩み・変色有無(加温・乾燥)

**外装・設置**

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

**消耗品**

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルター(フレ)のつまり・汚れ
- エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチュウブ

**性能評価**

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

**運転確認**

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
DPIチャージ セニサー ボックス	2
	1



機械事業本部営業部 営業サービス課  
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺町 70-6  
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030