

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	12-01148	No. 141227
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 長野支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	おひさまクリニック 様		機番	100252
環営	所在地	長野県安曇野市北穂高143-7		納入日	平成23年5月23日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年12月10日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成26年12月19日

修理依頼・不具合内容

タッチパネルのボタンを押しても効かない（フリーズ状態）
12/3 と 12/10 に発生した

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検および作業内容

工場で運転確認したところ、異常は再現しませんでした。故障の前兆と考えて「フリーズ状態」に関係する部品を全て交換しました。

写真：交換部品一式



〔2〕作業内容

- 1：タッチパネル～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 2：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

〔3〕性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.71ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

承認
安 14.12.27 田
審査
中 26.12.27 澤
作成
H26.12.27 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1台	
	コントロール基板	1枚	
	アルコールタンクキャップ	1個	強度UP品

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528