

点検・修理報告書

管理 No. 20180223

発行日: 2018年 02月 23日

IC Washer			
作業年月日	2018 年 2 月 23 日		作業時間: 10 Hr
顧客名	志津ココロ歯科 様	TEL:	
所在地	千葉県佐倉市西志津2-6-4	ご担当 様	
販売店	株式会社モリタ 千葉営業所	ご担当 様	
納入年月日	2016 年 3 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100088	運転回数: 1062	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001012
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 定期部品交換実施後水漏れによる異常停止

原因

① 当社委託サービス会社 (MCサービス) 定期交換実施時ドアパッキン取付の位置ずれ

2方向チーズジョイントの亀裂を発見できず水漏れが原因

2方向チーズジョイント亀裂は、ホース継手の漏れと勘違いして、バンド締めすぎでジョイント亀裂。(可なりの変型)

処置、作業内容

① ドアパッキンを正常な位置に取付ドアを全閉時のドアパッキン密着圧力の調整実施 (規定圧力)

② 2方向ジョイント交換 (新品)

③ ドア開閉対策部品に交換 ④ ドア二重ガラス交換 ⑤ その他点検実施、試運転5回しております異常ありません正常です。

特記事項

洗浄層内部の循環水ストレーナーに目詰まり等ありこまめな清掃をお願いします。 循環水ポンプの故障、循環水圧低エラーの

原因につながります。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	2方向チーズジョイント	762253370	1		
2	ドア開閉対策部品		1セット		
3	ドア二重ガラス交換		1		
4	SDスロット防滴カバー取付		1		
5	パワーサプライ5V防滴カバー取付		1		
6	シリコンシート固定金具取付		1		
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 3 月 16 日

ご署名 増田 麻祐美

印 増田

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

桐
 '18/02/23
 野

桐
 '18/02/23
 野