

モリタ用



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービス部GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-16528

FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	千葉県循環器医療センター	製造番号	100301 100301	ご確認	
	住所		納入検査実施日	2017/12/17		
	納入場所	歯科外来	納入検査実施者	長次 氏		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	SDカードソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	作業工程表示は正しいか
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	網カゴ、破損汚れ		✗	本体の水平確認・基準傾き内 → 下記に追記
	✓	缶内スレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
				✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音

備考			
2017/12/17	うっか本体重量を支えられず、1200×600の木材(厚さ20mm)をE		
	補強として追加しました。		

設置場所が不安定、ステンレスなので板がうろたわっている状態。
 重さで崩れやすくなる可能性が高いのでアクリル板が必要かと思われ、モリタ増田
 →長崎へ報告