

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年3月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300058
作業年月日	平成27年3月25日		作業時間: Hr
顧客名	稲里生協クリニック		TEL: 0262-86-1500
所在地	長野市稲里町中央2-17-8		担当 安藤様
販売店	中日本エス・エル・エス(株)長野事業所		担当 小林様
納入年月日	平成25年8月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/24 排水注意(E11) x 1回
3/25 排水注意(E11) x 2回

不具合原因、作業内容

活性炭フィルタ汚染による排水注意(E11)表示
活性炭フィルタ交換により排水時間 3分半 → 1分35秒に短縮確認しています

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

正常運転を確認済。

装置 情報	交換後運転回数: 332	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 620	殺菌+アル: 341
	リークチェック: 954	自己洗浄: 347	アルコール単独: 3	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
活性炭フィルタ		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2015年3月25日

ご署名 小林 恵子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者 作業者

