

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年5月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	300028
作業年月日	平成27年5月21日		作業時間	/ Hr
顧客名	小林病院		TEL	026-226-7880
所在地	長野市南千歳 1-14-2		担当	外来 新井 様
販売店	有限会社 ヤマノメテカル		担当	横谷 様
納入年月日	平成25年5月16日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/9 E302 濃度維持異常 + E110 オゾン水生成注意
12/2 E302 " + E110 "

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 587
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Ver. 0264/102 B

異常ありません。ホニバ残エが少なくなっています。早めの交換をお願いします。

装置 情報	交換後運転回数: 1062 更新(リセット)実施・未実施		殺菌: 2136	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 4	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年5月21日

ご署名

新井 悦子



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.5.21	H27.5.21