

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 27年 4月 22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100618	
作業年月日	平成 27年 4月 22日		作業時間	115 Hr	
顧客名	吉岡医院 様		TEL	0553-23-5206	
所在地	山梨県山梨市東後屋敷524-1		担当	様	
販売店	マコト医科精機(株)		担当	北条 様	
納入年月日	平成 25年 4月 24日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 700
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
基板 Ver.0107			

装置 情報	交換後運転回数	68	更新（リセット）	実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌	129	殺菌+アル	0
	リークチェック	0	自己洗浄	3	アルコール単独	0	エア単独	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	フェーゴコック（本体側）		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	〃（フェーゴ側）		☒	2
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾン分解ショベル		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 寺田 正和		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
	