

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成 27年 6月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号:	300231
作業年月日	平成 27年 6月 1日	作業時間:	/ Hr
顧客名	あんずの里クリニック 様	TEL:	026-272-1005
所在地	千曲市大字森2606-3	担当	院長 西村 様
販売店	岡野薬品株式会社 長野営業所	担当	吉原 様
納入年月日	平成 26年 5月 19日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常ありません。

不具合原因、作業内容

定期保守作業実施。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 72.8
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☐
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☐
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☐
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置情報	交換後運転回数: 118	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 106	殺菌+アル: 13
	リークチェック: 7	自己洗浄: 2	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年 6月 1日

ご署名

西村 博行



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

H27.6.1

H27.6.1

