

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 6 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	300324	
作業年月日	平成 27 年 6 月 24 日		作業時間	/ Hr	
顧客名	百瀬医院 様		TEL	0263-58-2506	
所在地	長野県松本市大字内田381		担当	様	
販売店	松本日興医療商事株式会社		担当	大和 様	
納入年月日	平成 26 年 6 月 6 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☐	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 383
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌：	97	殺菌+アル：	126
	リークチェック：	0	自己洗浄：	2	アルコール単独：	0
					エア単独：	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクター継手 本体側		☐	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクター継手 チューブ側		☐	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

責任技術者

作業者

H27.6.24

H27.6.24

