

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 10 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号: 300343
作業年月日	平成 27 年 10 月 13 日	作業時間: 1 Hr
顧客名	小川村国民健康保険直営診療所	TEL: 026-269-2279
所在地	上水内郡小川村高村 13467	担当 様
販売店	株式会社 スズケン 長野支店	担当 平田 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

※ 給湯器からの給水
※ 給水フィルタ有り

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 522
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

① アルコールタンクキャップ破損確認 → 後日部品交換致します。
② 定期保守実施 → 1サイクル正常終了確認致しました。

装置 情報	交換後運転回数: 113	更新(リセット) 実施・未実施	殺菌: 55	殺菌+7L: 59
	リークチェック: 0	自己洗浄: 20	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 10 月 13 日

ご署名 伊藤 晴美

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.10.13	H27.10.13