

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 10 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100560
作業年月日	平成 27 年 10 月 6 日	作業時間: 1 Hr
顧客名	東御市外務局 様	TEL: 0268-61-6002
所在地	東御市下土呂 様	担当 様
販売店	(株) X デイ オ 上田支店	担当 高橋 様
納入年月日	平成 24 年 9 月	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/20 起動時給水異常 (E201)
オーバーフロー異常 (E205) } x3 セット
レベルセンサ異常 (E214)

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 668
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

尚問題ありません。異常 (E201, E205, E214) については様子を見て下さい。
→現状異常ありません。

装置情報	交換後運転回数: 25	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 5	殺菌+アル: 96
	リークチェック: 97	自己洗浄: 66	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 10 月 6 日

ご署名

木島 手あみ



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

H27.10.6

H27.10.6

