

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 8 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100542
作業年月日	平成 27 年 8 月 20 日	作業時間: / Hr
顧客名	彦坂医院 様	TEL: 026-226-6930
所在地	長野市七瀬 中町176	担当 様
販売店	株式会社 銅林	担当 様
納入年月日	平成 24 年 7 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回 目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 3/26 オゾン水生成異常2 (E215) 5/2 排水異常2 (E402)
 6/30 24時間排水異常 (E203) ④ 不具合無し

不具合原因、作業内容
 点検作業実施
 Lot. 0107 / TOL A

点検項目		
フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒
トレー	正常	☐ → トレ- 亀裂あり
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	パルス数 402
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.76 ppm
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
 異常ありません。ポンパ残量が少なくなってきました。適宜、予備ポンパに交換ください。
 トレーに亀裂が見られます。破壊の場合はご相談ください。

装置情報	交換後運転回数: 389	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 1101	殺菌+アル: 2
	リークチェック: 0	自己洗浄: 418	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡搭載コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
酸素フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
 27 年 8 月 20 日
 ご署名 医療法人 彦坂医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.8.20 青木	1727.8.20 青木

ポンパ ④ GF-H260 x 1
 ⑦ CF-H260 AI CF-D260 AI