

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 06月 19日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 6 月 19 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	つきむら歯科クリニック 様 TEL:
所在地	茨城県稲敷郡阿見町中央1-5-29 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 10 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100008	運転回数: 1690	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 槽内より水漏れ			
原因			
① 冷水給水流量計コネクター接続に不具合ありましたが、槽内に給水オーバーフローセンサー固着して作動できず給水をし続けた。			
処置、作業内容			
① 給水流量計コネクター接続修理、オーバーフローセンサー固着洗浄			
固着原因は定期的にアイエステックを使用してスケールの除去をお願いします今後も固着をお越し同様のトラブルの発生が考えられます。(別紙写真を確認をお願いします)			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・乾燥ヒーター				
2	・乾燥ファン				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

H30 年 6 月 28 日

月村 騰



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
'18/06/19	'18/06/19