

2015年9月8日(火)

稲里生協クリニック 御中

株式会社IHIシバウラ  
機械事業本部 営業部  
環境・制御機器営業グループ

中 村

## 作 業 報 告 書

場 所：長野県長野市稲里町中央2-17-8

作 業 日：2015年9月2日

機 種：OED-1000S

製造機番：300058

作業内容：保守点検

\* 点検項目順に点検作業の実施  
(作業時間1.0h)


\* 点検交換部品の交換作業  
(交換部品)

- ・ オゾン濃度計
- ・ オゾンガスセンサー
- ・ 排水栓
- ・ フィルター
- ・ オゾン分解触媒
- ・ コネクタ継手

\* 性能確認

- ・ 保守点検報告書参照

\* 清掃作業

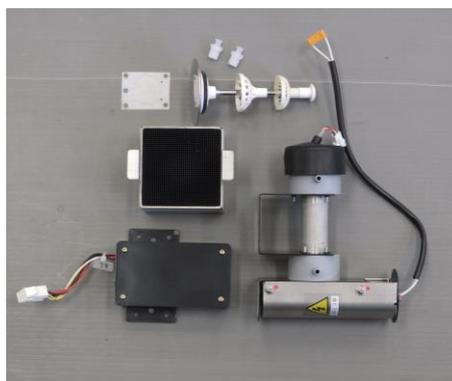

以上

## 調 査 報 告 書

納入先		機 種	OED-1000S
顧客名	稲里生協クリニック 様	機 番	300058
所在地	長野県長野市稲里町中央2-17-8	納入日	平成25年8月29日
点検者	中村日香理	作業時間	1h
返送先		受付日	平成27年9月4日
		出荷日	平成 年 月 日

### 調査依頼

排水管路内の異物確認  
(排水注意・排水エラー頻出のため。)

### 作業内容

①排水管路内目視確認  
止水弁～排水ポンプ～排水L字管

②排水ポンプ内インペラ確認




排水ポンプ内インペラ部分に、糸くず（ホコリ）が付着していたため、除去作業を行いました。

③排水ポンプ取り付け

④動作確認

正常終了しました。  
排水も順調に行われ、正常終了後の水残りも見られませんでした。

※現地、排水フィルター底部にも同様の糸くずの付着が見られました。  
内視鏡洗浄中に発生するものではないため、他の物も併せて洗浄している、と考えられます。  
内視鏡以外の物を洗浄しないよう、注意喚起をお願い致します。

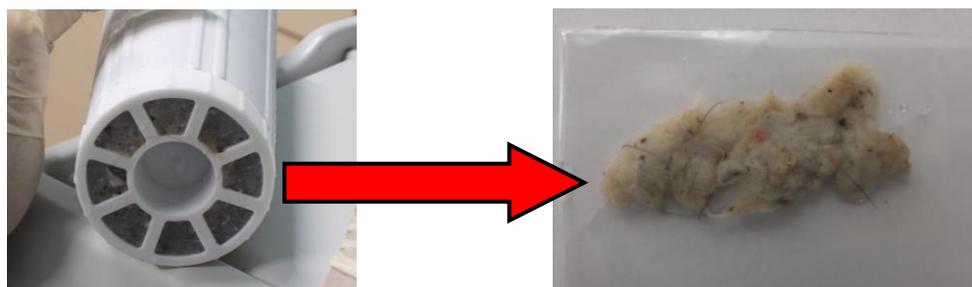

承認

品証  
'15/09/04  
上宮

審査

営業サービス  
'15/09/04  
安田

作成

環制営  
'15/09/04  
中村

**保守点検・修理 報告書**

管理 No.

発行日 平成27年 9月 4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300058
作業年月日	平成 27年 9月 4日		作業時間 : 1 Hr
顧客名	稲里生協クリニック 様		TEL : 026-286-1500
所在地	長野県長野市稲里町中央2-17-8		担当 様
販売店	新鋭工業(株) 長野支店 様		担当 様
納入年月日	平成 25年 8月 29日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目		定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>		修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数 : 624	更新 (リセット) <b>実施</b> / 未実施	殺菌 : 814	殺菌+アル : 439
	リークチェック : 1242	自己洗浄 : 447	アルコール単独 : 3	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		<input checked="" type="checkbox"/>	一式			<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 印

株式会社 I H I シバウラ 機械事業本部営業部 環・制機器営業G 長野県松本市石芝1-1-1 0263-25-9123	責任技術者	作業者
		