

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 10 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号: 300079
作業年月日	平成 27 年 10 月 20 日	作業時間: 1 Hr
顧客名	茅沢胃腸科外科医院	TEL: 026-222-2000
所在地	長野市木島 542-1	担当 永井 様
販売店	柳和医科器械株式会社	担当 鴨井 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 22 日	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	Ver. 0204 / TO2BV
5/17 レベルセンサー異常 (E214)	
6/4 オーバーフロー異常 (E205)	
6/4 レベルセンサー異常 (E214)	
不具合原因、作業内容	定期保守点検実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 420
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	異常ありません。非常に丁寧に作業いただきました。ありがとうございます。
----------------------------	-------------------------------------

装置情報	交換後運転回数: 700	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 640	殺菌+アル: 727
	リークチェック: 0	自己洗浄: 564	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (左側側)		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ継手 (右側側)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	27 年 10 月 20 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 芦沢 賢一	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
1727.10.20 	1727.10.20 

PCF
タイプA TYPE Q 150AL