

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 10 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300479
作業年月日	平成 27 年 10 月 13 日		作業時間:	Hr
顧客名	吉江内科病院		TEL:	0266-52-2525
所在地	諸戸市波崎 1794-1		担当	小千様 富坂 様
販売店	株式会社スズケン		担当	様
納入年月日	平成 27 年 2 月 日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 5/21 原水汚染異常 (E209) + ② 9/10 原水汚染異常 x 9 (シャワ-工程実施) + ③ 脱気フィルター + 検査立会い。(検査回約 10 月)

不具合原因、作業内容

内視鏡検査後、消毒工程立会い。

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.63 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

予備洗浄 + イソプロ (消毒アルコール) + 正常終了。

装置情報	交換後運転回数: 21	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 7	殺菌 + アル: 15
	リークチェック: 5	自己洗浄: 17	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	
オゾン濃度計		☐	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

27 年 10 月 13 日
吉江 富坂 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13

TEL: 0263-24-2840

ミニマム 1500
5/10302017

エスエー 10 液: アルカリ剤 = エチルグリセリン塩酸塩

マスキング液: クロロヘキシングルコニ酸塩

責任技術者	作業者
27.10.13 青木 印	27.10.13 青木 印