

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 9 月 8 日

|       |                                                                                       |                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S                                                                  | 製造番号: 300478                       |
| 作業年月日 | 平成 27 年 9 月 8 日                                                                       | 作業時間: / Hr                         |
| 顧客名   | ついで内科消化器科クリニック                                                                        | TEL: 0268-29-8686                  |
| 所在地   | 上田市築地 539                                                                             | 担当 飯島 様                            |
| 販売店   | 有限会社 長野西科器械                                                                           | 担当 藤巻 様                            |
| 納入年月日 | 平成 27 年 2 月 5 日 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                      | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                           | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/29. オゾン水生成注意 (E110) > O<sub>2</sub> 上昇に時間がかかる.

9/3 " (E110)

不具合原因、作業内容

① ホンパ残量少ない為、予備ホンパに交換

② 脱気フィルタ交換

| 点検項目     |                                                                    | 結果        |                                        | 備考          |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------|--|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |  |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |  |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | パルス数 49.5   |  |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |  |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |  |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |  |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input type="checkbox"/>            | 履歴 0.62 ppm |  |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |  |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |  |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |  |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |  |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

15:50 1サイクル運転 → 正常終了

(無償)

|      |              |                  |            |            |
|------|--------------|------------------|------------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 147 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: 21     | 殺菌+アル: 127 |
|      | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 106        | アルコール単独: 0 | エア単独: 0    |

| 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------|-------|--------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H.27 年 9 月 8 日

ご署名 飯島 義浩 印 (飯島)

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL: 0263-24-2840

|             |             |
|-------------|-------------|
| 責任技術者       | 作業者         |
| H27.9.8 青木順 | H27.9.8 青木順 |