

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100304
作業年月日	平成27年10月19日		作業時間: 1 Hr
顧客名	丸谷医院		TEL: 0269-26-0077
所在地	長野県中野市大字片塩465-1		担当 丸谷 様
販売店	有限会社 長野医科器械		担当 藤原 様
納入年月日	平成23年10月27日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 1/15 光量低下注意(E108)+オゾン水生成異常(E207)
2/6 原水汚水異常(E209)

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施
Ver 9.77 EG 27-110
Ver 0107/TOI-A

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 452
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません

装置情報	交換後運転回数: 126	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 20	殺菌+7L: 48.5
	リークチェック: 1	自己洗浄: 152	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクター(本体側)		☒	2
排水栓		☒	1	コネクター(コネクター側)		☒	2
濃度計フルーイ		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒383-0046 長野県中野市大字片塩465-1

医療法人 丸谷医院

理事長 丸谷和洋

ご署名 TEL (0269) 26-0077

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.10.19	H27.10.19

FAX 0269-26-0660