

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300381
作業年月日	平成27年10月6日	Ver.0205/1020	作業時間: 1 Hr
顧客名	金木内科クリニック様		TEL: 026-226-3553
所在地	長野市安茂里1820番地		担当 寺島 様
販売店	協和医科器械(株)		担当 北澤 様
納入年月日	平成26年10月2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。①アルコールタンクキャップ破損→部品交換済。
②レボオワシエ X 2 部品破損しました。

装置情報	交換後運転回数: 258	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 2	殺菌+アル: 257
	リークチェック: 252	自己洗浄: 178	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フルタ		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年10月6日

ご署名 金木内科クリニック



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.10.6	H27.10.6