

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業用
日付印

お客様 お名様	名称	検査番号	点検実施日	ご承認印	
	住所	運転回数	点検実施者		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバックイン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ (HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃 (給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工種色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止群の取り付け状態・汚れ

電線系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター様目確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無 (加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外観・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアバックインの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター (プレ) のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター (メイン) のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残液判定 (TOSI)

運転確認
 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアロック = L-500	1
" L-1500	1
DP1チューブ	2

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

③ 作業報告書

お名前	勝田台 7才ヤ歯科			様	ご承認印
住所	千葉県佐倉市井野1554-3				古谷
TEL	043-464-1818	署名			
機器 型式	ジェット洗浄機		メーカー	IH1アソテック	
	WD-150		(号機)	製番	14060078
定	継続	有料	無料	理研同致	同

ご依頼内容・現象		定期点検	
原 因		（ご依頼者	様）
処 置			
☒ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）	☐ 各部増締め	☐ 分解・再セットアップ	☒ 各部清掃
☐ グリスアップ	☐ 動作確認	☒ 設定・プログラムの確認	
☒ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）			
☐ 性能検査立ち会い	☒ 試運転	☐ 最終検査終了・異常なし	
※ 別途 水漏れ修理、洗剤ラック修理 （ヒータ部分、循環ポンプ、循環回路）			

お客様への伝言
洗剤ラック応急修理・要交換

作業日		20		19		年		1		月		9		日		
仮形 サ ス	守 形 態	1 安全 器具	2 性能 検査	3 点検 部位	4 点検 箇所	5 点検	9 対象 機	(概要)								
		作 用 機	2 ス キ ヤ	4 CM	医療 機器			特 徴	主 要 部							
作 区	業 分	00 製品 設計	10 納入 設計	11 現地 調査	20 初 期 検査	20 性能 検査	30 点 検	50 コ ル	60 機 組 立							
		70 ア ッ パー	72 取 組 み 調	73 改 良	74 部 品 納 入	75 下 見	77 PC	80 ア ッ パー	90 の め い							

受 付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・拨付(点格)・性族・	(元) 償還 No.	28,360
2	技術料 1.5 日 × 1 名 × 8,000 円		12,000
3	派遣料 1 名 × 100 円 × 22 km		2,200
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		0,000
5	諸経費		
6			

サビシメシ 〒114 TEL	氏名 佐藤 小泉 施設 者	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1326 1316 1453 1323">責任技術者</th> <th data-bbox="1453 1316 1570 1323">検印</th> <th data-bbox="1570 1316 1695 1323">入力</th> <th data-bbox="1695 1316 1704 1323">納品</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1326 1323 1453 1334"></td> <td data-bbox="1453 1323 1570 1334"></td> <td data-bbox="1570 1323 1695 1334"></td> <td data-bbox="1695 1323 1704 1334"></td> </tr> </table>	責任技術者	検印	入力	納品				
責任技術者	検印	入力	納品							

取扱業者（請求先）

管理No. 808614

(支店名)

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

(二) 相当額

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

(注文No.)

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

札幌店 札幌市東区南一条 1-1-1
 仙台店 仙台市青葉区中央 1-1-1
 東京店 東京都中央区銀座 4-1-1
 大阪店 大阪市中央区南船場 1-1-1
 名古屋店 名古屋市中区栄 1-1-1
 福岡店 福岡市中央区天神 1-1-1
 札幌支店 札幌市東区南一条 1-1-1
 仙台支店 仙台市青葉区中央 1-1-1
 東京支店 東京都中央区銀座 4-1-1
 大阪支店 大阪市中央区南船場 1-1-1
 名古屋支店 名古屋市中区栄 1-1-1
 福岡支店 福岡市中央区天神 1-1-1

洗淨・滅菌器具洗浄・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター
 〒306-0002 長野県上田市住吉280-0
 TEL 0266-27-2230 FAX 0266-27-2250
 福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社
 〒387-0613 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

部品代	4	640
-----	---	-----

14 B			
技術料等		45	560

15

16	150	200
----	-----	-----

消費税	4016
-----	------

ご請求金額 円	54,216
---------	--------

藥品部

B 实施者→取扱業者