

保守点検・修理 報告書

管理 No.

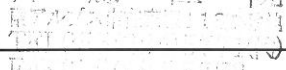
発行日 平成 27年 12月 17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	300416
作業年月日	平成 27年 12月 17日		作業時間	/ Hr
顧客名	齊藤医院		TEL	055-284-5771
所在地	山梨県南アルプス市在家塚1189		担当	様
販売店	株式会社 平塚メディカル		担当	末木 様
納入年月日	平成 26年 12月 9日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 405
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2,70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数: 139	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 3	殺菌+アル: 137
	リークチェック: 0	自己洗浄: 135	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ-継手 本体側		☐	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ-継手 チューブ側		☐	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 27.12.17 月 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		齊藤医院 ご署名  印 

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

責任技術者	作業者
	