

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 11 月 19 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2018 年 11 月 9 日		作業時間： Hr
顧客名	ワカスギ歯科クリニック 様	TEL： 043-257-2870	
所在地	千葉県千葉市花見川区作新台3-5-60		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 4 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080170	運転回数： 1184
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルの反応が鈍い

原因

・機械本体の扉のレベルがずれてしまっていることにより、扉を閉めた際に本体側の枠の淵に接触してタッチパネルに圧力がかかり、誤探知して操作に反応しにくくなった



処置、作業内容

・扉のレベル調整とアジャスト修正
・各種点検、運転確認

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

〒267-0045 千葉県千葉市花見川区作新台3-5-60

ワカスギ歯科クリニック

043-257-2870

ご署名 若 杉 敦 朗 印

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJサービス '18/11/09 安田	環境PJサービス '18/11/09 安田