

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成27年7月30日

販売名	ポン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100117	
作業年月日	平成 27年7月30日		作業時間:	/	Hr
顧客名	玉井医院		TEL:	0263-67-2232	
所在地	東筑摩郡麻績村麻4156-1		担当	様	
販売店	株式会社 マテリア 松本支店		担当	臼井 様	
納入年月日	平成 20年 7月 16日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
2/12 14 排水異常 (E401)
" 2 (E402)
ホドロー異常 (E205)

不具合原因、作業内容
定期保守点検実施 (5回目) ver.0107/To1.A

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数 552
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.64 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
異常ありません。ポンプ残圧が低くなっています。直営予備ポンプに交換ください。

装置情報	交換後運転回数: 38	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 533	殺菌+アル: 3
	リークチェック: 0	自己洗浄: 23	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 本体側		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ継手 チューブ側		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。
2015 年 7 月 30 日
ご署名 玉井 方 貴 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者 H27.7.30 	作業者 H27.7.30
-----------------------	---------------------