

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年7月28日

販売名	ポン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100788
作業年月日	平成 27年7月28日		作業時間:	1 Hr
顧客名	峯村医院		TEL:	026-282-6172
所在地	長野市若穂川田1684-2		担当	様
販売店	株式会社 マテリア 長野支店		担当	高橋 様
納入年月日	平成 25年 7月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
H25/1/30 } オゾン水生成異常2 (E215) H25/1/20 排水異常2 (E402)
1/31 }

不具合原因、作業内容
定期保守点検実施

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☒

パルス数

385

履歴

0.76 ppm

清掃

☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
異常ありません。ポンプ残圧少なくなっている。適宜予備ポンプに交換ください。 ver. 0107/T01-A

装置情報	交換後運転回数: 335	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 461	殺菌+アル: 163
	リークチェック: 0	自己洗浄: 3	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ-継手 本体側		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ-継手 チューブ側		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。
27年 7月 28日 峯村医院 ご署名 院長 峯村 善保 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者 H27.7.28 (青木順)	作業者 H27.7.28 (青木順)
----------------------------	--------------------------