

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 10月 25日
【対応日】 2018年 10月 29日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
☐ユーザー
☒その他(岩瀬歯科商会 千葉 様)
【ユーザー名&県名】千葉県 海岸歯科室

IC Washer【機番: 】

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐水

☐水 & お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

BC-17【機番: 13090030】

【症状】

エラー10: 蒸気発生器高温異常

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☒部品交換(給水タンクキャップ交換)
☐その他()

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☒リユース

【網の種類】☐トレイ欄

☒網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☒有 ☐無

【設置場所】

【備考】

給水タンクキャップ劣化により給水されなかったためエラーが発生した。
給水タンクキャップの交換を行った。
後日部品代請求予定。