

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年2月 / 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300058	
作業年月日	平成28年2月 / 日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	新島建設株式会社		TEL:		
所在地	長野市新島町中央2-17-8		担当	様	
販売店	中日本メディカル(株) 長野事業部		担当	小林 様	
納入年月日	平成25年8月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守後 5か月の排水状況確認

無償

不具合原因、作業内容

排水フルタイム清掃 現状排水時間 約2分20秒

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 378
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水フルタイムに少量の（紙状の）をくすがありました。排水フルタイム清掃を行い排水時間約1分45秒程となっており、異常ありません。

装置情報	交換後運転回数: 228	更新(リット)実施・未実施	殺菌: 962	殺菌+7L: 519
	リークチェック: 1462	自己洗浄: 527	7L単独: 3	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	
オゾン濃度計		☐	1			☐	
脱気フィルター		☐	1			☐	
排水栓		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 2月 / 日

ご署名

子 祐 恵 子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.2.1	H28.2.1