

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業用
IHIアグリテック用

お客様 お名様	名称	森川歯科医院	製造番号	14070138	点検実施日	2019/12/12	ご承認 印	新 17
	住所	千葉県茂原市道表21-4	運転回数	2271	点検実施者	エムサービス(株)佐藤		
	納入場所		サービス形態		モリタ提出書類			

計装(安全)



圧力計0点指示試験

ドア



フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認



開閉ハンドル取付け状態・動作確認



フック取付け状態・動作確認



フックバネ・フック緩衝ピンの取り付け状態



ピストン・ナット・ホーローセット増し締め



ドアカバーの取り付け状態・割れ



フック検出ユニット動作確認



ドアロックユニット動作確認



蓋板のキズ・汚れ



開閉ハンドルの損傷確認

缶体



割れ・キズ・腐食・汚れの有無



減圧温度センサの汚れ



製カゴの破損・汚れ



缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系



フッ素樹脂チューブ・緩手の損傷・漏れ



シリコンチューブ・緩手の損傷・漏れ



給気弁の動作状態・漏れ



排気弁の動作状態・漏れ



真空・乾燥弁の動作状態・漏れ



減圧弁の動作状態・漏れ(3方弁)



ドレン弁の動作状態・漏れ(3方弁)



ストレーナーの汚れ



排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損



安全弁(減圧室)の漏れ



安全弁(蒸気発生器)の漏れ



ダンプナーの漏れ・溶接割れ



大気圧検知圧カスイッチの動作状態・漏れ



ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器



ソケット他溶接割れ・漏れ



フランジパッキン漏れ



ヒーター取り付け状態・漏れ



空焚き防止器・温度センサ取り付け状態



電磁ポンプの動作状態・異音・漏れ



逆支弁の動作状態・漏れ

真空ポンプ



水漏れ・異常音の確認



真空到達度 -86.4kpa -90.9kpa

給水タンク



給水タンクの損傷・漏れ



下部給水弁の漏れ



蓋・取っ手の損傷・割れ



フロートスイッチの動作状態・汚れ

排水タンク



タンクの汚れ・漏れ



フロートスイッチの動作状態・汚れ

電線系



タッチパネルの動作状態・キズ・汚れ



ディスプレイの色あせ・表示確認



電圧スイッチの動作状態



行程表示LEDの点灯



電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ



各基板のコネクター緩み確認



端子の緩み・コネクターの接続確認



配線の変色・損傷有無・結束状態



圧力センサーの取付け状態・入力確認



ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)



外装・設置



本体の水平確認・基準傾き内



アジャスタフットの緩み・設置状態



キズ・汚れ



制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷



制御



運転プログラムの確認



入力・出力確認



試運転プログラムの実行・異常動作の有無



消耗品



ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ



エアフィルターの変更・汚れ



性能評価



B&Rテスト実施



ケミカルインジケータによる判定



リークチェック



キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【

】

運転確認

合

否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○をつける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-8528

FAX:086-942-9030