

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年12月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300/04
作業年月日	平成27年12月8日		作業時間: 1 Hr
顧客名	柳井内科病院		TEL: 0269-26-1241
所在地	長野県中野市金井893-2		担当 様
販売店	岡野薬品株式会社		担当 吉原 様
納入年月日	平成25年11月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴		Ver: 0204/T02BV	
10/23 消毒時給水異常 (E202)			
12/4 水位低下異常 (E300)			
12/4 消毒槽異常 (E101)			
不具合原因、作業内容			
・定期保守作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 524
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			
※ E300 → オゾン濃度計交換			
※ E101 → 排水栓交換			

装置 情報	交換後運転回数: 525	更新(リット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 268	殺菌+7L: 758
	リークチェック: 0	自己洗浄: 4	7L単独: 2	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡、送水パイプ		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		平成27.12.月8日	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名	
		印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
127.12.8	127.12.8
青木	青木