

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 12日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 11 月 8 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	太田歯科診療所 様 TEL: 0438-25-7066
所在地	千葉県木更津市太田2-14-10 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 3 月 31 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100206	運転回数:	ソフトウェアVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① エラー1 漏洩検出			
原因			
① 循環ライン継手エルボ破損による機体内漏水			
処置、作業内容			
・ストレートエルボ樹脂継手交換			
・ドア開閉対策部品交換			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ストレートエルボ樹脂継手		1		
2	・ドア開閉部品一式		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒292-0044 千葉県木更津市太田2-14-10

太田歯科診療所

TEL/FAX 0438-25-7066

ご署名

修理業者

株式会社IHアグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'18/11/12
桐野

環PJ
'18/11/12
桐野

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 太田歯科診療所 御中 製造番号 100206
住所 千葉県木更津市太田2-14-10
点検日 2018年 11月 8日
点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

〒292-0044 千葉県木更津市太田2-14-10

太田歯科診療所

TEL/FAX 0438-25-7066

2018年 11 月 12 日

ご署名



本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528