

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

12-01406

No. 151102

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	福澤医院 様		機番	100533
環営	所在地	長野県松本市和田1858番地10		納入日	平成24年7月10日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年10月22日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成27年10月31日

修理依頼・不具合内容

10/21、22 原水汚れ異常（E:209）4回発生して運転できない

※修理代替機も「原水汚れ異常」が発生した

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕原水汚れ異常につきまして

オゾン水濃度計に流入する水に気泡や懸濁物が多く含まれると、濃度信号が乱れる傾向があります。この濃度信号が規定より外れると「異常」と判断して停止します。

工場で運転確認や内部点検しましたが、異常はありませんでした。
修理代替機も同じ症状が出ることから、現地の水質が不安定な状態にあると推察し
運転プログラムの設定値を変更しました。
これで様子を見てくださいますよう お願いいたします。

なお、お客様が機械をお使い頂くうえでの変更はございません。

〔2〕修理・点検内容

- 1：運転確認・・・「原水汚れ異常」は再現しませんでした
- 2：オゾン水濃度計点検・・・異常ありませんでした（濃度信号パルス 516）
- 3：運転プログラム設定値変更・・・Ver0107⇒Ver0107 改
- 4：装置情報

交換後運転回数：47 殺菌：12、殺菌+アルコール：534、リークチェック：0
自己洗浄：489、アルコール単独：0、エア単独：0

—以上—

承認



審査



作成

H27. 11. 2

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	アルコールタンクキャップ	1 個	強度 UP 品
	接続コネクタ；水槽側	2 個	強度 UP 品

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528