

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 3 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100400
作業年月日	平成 28 年 3 月 25 日	作業時間：1 Hr
顧客名	赤川医院 様	TEL：026-221-1000
所在地	長野市大字南長池 190-2	ご担当 様
販売店	鍋林株式会社 長野営業所	ご担当 睡原 様
納入年月日	平成 24 年 6 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/8 濃度維持異常 ×2 (E302)

Ver.0107/TOL.A

12/24 停電 (E403)

不具合原因、作業内容

保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 411
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

ポンパ残量が少なくなっています。適宜予備ポンパに交換ください。

装置情報	交換後運転回数：259	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：629	殺菌/消毒+7L：0
	リークチェック：0	自己洗浄：389	7Lアルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールタンクキャップ（新）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 3 月 25 日

ご署名 藤倉 和枝



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.3.25 	H28.3.25