

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 3 月 17 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号：300222      |
| 作業年月日 | 平成 28 年 3 月 17 日                                                                                                          |                                                                       | 作業時間： / Hr       |
| 顧客名   | 曾我医院 様                                                                                                                    |                                                                       | TEL：0265-22-1653 |
| 所在地   | 飯田市鼎東鼎 20-2                                                                                                               |                                                                       | ご担当 様            |
| 販売店   | 銅林株式会社 飯田営業所                                                                                                              |                                                                       | ご担当 野村 様         |
| 納入年月日 | 平成 26 年 3 月 13 日                                                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴無し

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

|          |    |                                                                            |              |    |                                              |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 920 |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 | <input type="checkbox"/> 履歴 ppm              |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                                   |              |    | <input type="checkbox"/>                     |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません

|          |             |                |           |              |
|----------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：482 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒：263 | 殺菌/消毒+アル：659 |
|          | リークチェック：927 | 自己洗浄：2         | アルコール単独：1 | エア単独：0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28 年 3 月 17 日

ご署名 新本 ひろみ 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL：0263-24-2840

| 責任技術者            | 作業者              |
|------------------|------------------|
| H28.3.17<br>新鋭工業 | H28.3.17<br>新鋭工業 |