

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年2月 / 日

|       |                                                                  |                                                            |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S                                             |                                                            | 製造番号: 300295      |
| 作業年月日 | 平成28年2月 / 日                                                      |                                                            | 作業時間: / Hr        |
| 顧客名   | 市川医院                                                             |                                                            | TEL: 0267-25-1200 |
| 所在地   |                                                                  |                                                            | 担当 五十嵐 様          |
| 販売店   | (株) 千曲医療機器                                                       |                                                            | 担当 小 木 様          |
| 納入年月日 | 平成26年5月20日                                                       | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/>                           | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴  
 鉗子口 接続チューブ 先端ゴム劣化に付チューブ外れ 発生  
 アルコールタンクキャップ 破損

不具合原因、作業内容  
 ① 鉗子口 接続チューブ (E-10) 交換 消耗品となります  
 ② アルコールタンクキャップ 破損 → 部品交換済

| 点検項目     |                                                                               |           |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バル数         |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.75 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項  
 内視鏡、2本に対し 消毒+アルコール を行いました。  
 チューブ外れなく 正常終了を確認しています。 ボンバ残量が少なくなっております 消毒交換ください  
 前回定期保守 28年5月26日実施

|      |              |                                                                               |            |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 483 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 397    | 殺菌+7L: 711 |
|      | リークチェック: 3   | 自己洗浄: 9                                                                       | アルコール単独: 0 | エア単独: 0    |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                       | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード          | 交換                                  | 数量 |
|---------|-------|--------------------------|----|--------------|----------------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒 |       | <input type="checkbox"/> | 1  | 接続チューブ 鉗子口   | 76230274 (E10) | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー |       | <input type="checkbox"/> | 1  | アルコールタンクキャップ |                | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン濃度計  |       | <input type="checkbox"/> | 1  |              |                | <input type="checkbox"/>            |    |
| 脱気フィルター |       | <input type="checkbox"/> | 1  |              |                | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排水栓     |       | <input type="checkbox"/> | 1  |              |                | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄  
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。  
 428 年 2 月 / 日  
 ご署名 五十嵐 早良 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
 長野県松本市高宮東5-13  
 TEL: 0263-24-2840

| 責任技術者    | 作業者      |
|----------|----------|
| H28.2. / | H28.2. / |

EG-580NW2 x2本

9. 12. PM 7:20