

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 12月 17日
【対応日】 2018年 12月 18日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
☐ユーザー
☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 千葉県 ワカスギ歯科クリニック

WD-150【機番:14070115】※デモ機

IC Clave【機番: 】

【症状】

循環水圧低下

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

■現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☒その他()
仕上げ剤の量調整
圧力検知時間の変更
スプレーノズル、フィルターの清掃

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ■水

☐水 & お湯

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】 ☐標準ラック

■ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無 ※すべて吸引管

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【備考】

デモ機の不具合。

吸引管立てになにもささってないこと、93℃10分で運転しており、仕上げ剤の量が原因となっていたと推測し、上記作業を行い、正常に終了することを確認。
12/19に再度訪問し、確認を行う。

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】