

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 12 月 7 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2018 年 11 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	原歯科医院 様	TEL： 0274-67-7768	
所在地	群馬県甘楽郡甘楽町金井76-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100062	運転回数： 2314
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 缶体真空異常

原因

・真空ポンプ劣化（エラー30）

※ 排水タンクに異物（おそらくオイル残留物）が溜まっていました。 真空ポンプにも異物が混入し劣化したものと予想されます

処置、作業内容

真空ポンプ交換 ドアパッキン交換

各種調整、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用ドアパッキン				
2	・真空ポンプ				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※定期点検費用に含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 12 月 14 日

ご署名

原、一史

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJサービス '18/11/14 安田	環境PJサービス '18/11/14 安田