

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 1月 21日
【連絡元】 ☐ モリタ (担当者:)
 ☐ ユーザー
 ☐ その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 神奈川県 関内馬車道デンタルオフィス

IC Washer【機番: 100192】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー16: 槽内温度低下1

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

■ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☒ その他 ()

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

□ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☐ その他 ()

【給水方法】 ■ 水

☐ 水 & お湯

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

■ ハンドピース用ラック

 《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無 ※すべて吸引管

 《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【備考】

パラメータ変更

・すすぎ1,2→120秒

・温度センサ間差5℃120秒

上記変更をし、様子を見てもらうこととした。

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】