

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 2月 1日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 1 月 29 日 作業時間: Hr
顧客名	KAIGAN DENTAL OFFICE こどもの歯医者様 TEL: 043-270-7618
所在地	千葉県千葉市美浜区高洲3-15-2 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100147	運転回数:	リッチパ'ルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	-------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 漏洩検知エラー1 槽外への水漏れ

原因

① 乾燥ライン樹脂フランジ亀裂により水漏れで漏洩検知

処置、作業内容

① 乾燥樹脂フランジ交換 槽外への水漏れは修理後運転確認を致しましたが現象が発生致しませんでした

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥樹脂フランジ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 2月 4日

ご署名 阿部 由奈 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJ '19/02/01 桐野	環境PJ '19/02/01 桐野