

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 2016-3-23  
発行日：平成 28年 3月 23日

|       |                                                                                                                           |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     | 製造番号： 300199      |
| 作業年月日 | 平成 28年 3月 23日                                                                                                             | 作業時間： / Hr        |
| 顧客名   | しもべ病院 様                                                                                                                   | TEL： 0556-36-1111 |
| 所在地   | 山梨県南巨摩郡身延町下部1063                                                                                                          | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社 匠メディカル                                                                                                               | ご担当 深山 様          |
| 納入年月日 | 平成 26年 3月 6日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>                                                   | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                   |

|                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                       |                                                           |
| 不具合は特に無し                                                              |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                                            |                                                           |
| 保守点検作業                                                                |                                                           |
| 点検項目                                                                  |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input type="checkbox"/>                                  | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 621 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                            | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                        | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/>                                  |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                             |                                                           |
| 異常ありませんでした                                                            |                                                           |

|          |                                                                                         |            |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 97 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 122 | 殺菌/消毒+7L： 103 |
|          | リークチェック： 1 自己洗浄： 3                                                                      | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| ワゴン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ワゴン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ワゴン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                        | 平成 28年 3月 23日                                                                               |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |                                                                                             |
| ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |                                                                                             |
| ご署名                              | 柳沢 清美  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL：0263-24-2840

| 責任技術者                                                                                      | 作業者                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/23  | 3/23  |