

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 2月 25日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 2 月 20 日 作業時間: Hr
顧客名	原歯科医院 様 TEL: 0274-67-7768
所在地	群馬県甘楽郡甘楽町金井76-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 9 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100009	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー1 漏洩検知 機体内の水漏れ			
原因			
・ 乾燥空気ライン樹脂継手部ホース締付バンド締付不良による漏水			
処置、作業内容			
・ 締付バンド対策品に交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥ラインホースバンド		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 2月 27日

ご署名

原 一 郎

修理業者

株式会社HIAグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
桐野	桐野
19/02/20	19/02/20
野	野