

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28年 7月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300296
作業年月日	平成 28 年 7 月 19 日		作業時間： / Hr
顧客名	小林医院 様		TEL： 055-241-5293
所在地	甲府市小瀬町3-4		ご担当 様
販売店	株式会社 トリ山梨		ご担当 清水 様
納入年月日	平成 26 年 6 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴		Ver 0207/T02 BV	
異常履歴なし			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 4.56
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
給水フィルター	☐	排水フィルター	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません お手入れについても現状どおりお願いいたします			

装置 情報	交換後運転回数： 400	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 317	殺菌/消毒+アル： 506
	リークチェック： 0	自己洗浄： 2	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコール濃度計		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	パルス計		☒	1

お客様ご確認署名欄		H28 年 7 月 19 日	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		小瀬町3-4 法人 陽明会 小林医院 TEL (241)-5293	
ご署名		印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL：0263-24-2840

理事長	責任技術者	作業者
H28.7.29	H28.7.29	