

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28年 5月 20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300028
作業年月日	平成 28 年 5 月 20 日	作業時間： 2.5 Hr
顧客名	小林病院 様	TEL： 026-226-7880
所在地	長野市南千歳一丁目14番地2	ご担当 様
販売店	有限会社 ヤマイダール	ご担当 横谷 様
納入年月日	平成 25 年 5 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

Ver. 0204/T02.B

4/26より排水注意(E111) 5/20本日迄

→ 5/20 給水フィルタ、排水フィルタの交換実施

不具合原因、作業内容

保守点検作業 + 給水フィルタ、排水フィルタの交換
+ マニホールド周辺チューブ交換
+ パリスタ追加

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 498
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
給水フィルタ	☒	排水フィルタ	☒ パリスタ ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機械本体の動作確認し、異常ありません。給水、フィルタ、排水フィルタの交換を行いました。
ポンパを数回バクンと鳴らしています。適宜、ポンパ交換をお願いします。

装置 情報	交換後運転回数： 1000	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 3137	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 4	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水・排水フィルタ		☒	各1
オゾンセンサー		☒	1	給水・排水フィルタ		☒	1

お客様ご確認署名欄

28 年 5 月 20 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

中村 周子

中村 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.5.20	H28.5.20

Ver.3.1