

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28年 8月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100542
作業年月日	平成 28 年 8 月 23 日	作業時間： / Hr
顧客名	彦坂医院 様	TEL： 026-226-6930
所在地	長野市大字鶴賀七瀬中町 176-1	ご担当 様
販売店	株式会社 鍋林	ご担当 腰原 様
納入年月日	平成 24 年 7 月 12 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴 Ver. 0107/101.A

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	清掃 ☒
トレイ	正常	☒	* 左ヒューズ付近にヒビ
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
給水フィルター		☐	
殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	パルス数 540
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	
マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
排水フィルター		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません

* 昨年同様トレイにヒビがあります。破損の場合ご相談ください。

装置情報	交換後運転回数： 337	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 1439	殺菌/消毒+7L： 2
	リークチェック： 0	自己洗浄： 564	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	パルス計		☒	1
オゾンセンサ		☒	1	オゾン水濃度計用ケーブル		☒	1

お客様ご確認署名欄

28年 8月 23日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名医療法人 彦坂医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.8.23	H28.8.23