

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 25日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2019 年 4 月 19 日		作業時間: Hr
顧客名	藤本歯科登戸医院 様	TEL: 043-248-1030	
所在地	千葉県千葉市中央区登戸1-4-10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 1 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100065	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー1 漏洩検知 機体内の水漏れ			
原因			
・ 機体内部 循環水ライン樹脂継手亀裂により水漏れで漏洩センサーが作動			
処置、作業内容			
・ 循環水ライン樹脂継手交換 (対策部品)			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環水ライン樹脂継手		6		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認事項

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 4 月 26 日
 藤本歯科登戸医院
 〒260-0032 千葉県中央区登戸1-4-10
 高橋 真和 TEL: 043-248-1030

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/04/25 富田	環境PJ '19/04/25 桐野