

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

12-01621

No. 160615

配 布 先		納 入 先	新鋭工業 株式会社 長野支店 殿			機 種	O E D - 1 0 0 0 S
客先	1	顧 客 名	斉藤医院 様			機 番	3 0 0 4 1 6
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	山梨県南アルプス市在家塚 1 1 8 9 番地			納 入 日	平成 26 年 12 月 9 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成 28 年 5 月 27 日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成 28 年 6 月 13 日
計	3						

修理依頼・不具合内容

タッチパネルのボタンを押しても効かない（フリーズ状態）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

工場で運転確認したところ、不具合が再現しました
タッチパネル単体の故障で、メーカーに送付して調査いたします。
念のためにコントロール基板も交換しました。

写真：交換部品一式



[2] 作業内容

- 1：タッチパネル～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 2：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

[3] 性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

[4] 装置情報

交換後運転回数：64 殺菌：8、殺菌＋アルコール：196、リークチェック：0
自己洗浄：191、アルコール単独：0、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1台	
	コントロール基板	1枚	

承認



審査



作成

H28. 6. 15

中澤

(株) IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528