

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 6月 14日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
 ☐ユーザー
 ☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 千葉県 山田歯科クリニック

IC Washer【機番:100171】

【症状】

エラー1:漏洩検出
エラー6:給水時間超過

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

■現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】☐水

■水 & お湯

【ラック種類】☐標準ラック

■ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無 ※すべて吸引管

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

給水時間エラーが本洗浄工程時に発生していたこと、槽内に残っていた水が明らかに多かったこと、単独操作でお湯の流量計が目視とかなりズレがあったことから温水流量計の故障が原因とみられる。流量計がくるっていたために、槽内から水があふれてエラー1が発生したと考えられる。現在は設定を水のみにし運転してもらっている。岡山から部品が届き次第、現地交換の予定。(洗浄槽満水エラーが発生しなかった理由は不明)

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐デスポ

☐リユース

【網の種類】☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】