

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28年 10月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100568
作業年月日	平成 28 年 10 月 27 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	祢津診療所 様		TEL： 0268-62-0273
所在地	東御市祢津343-2		ご担当 湯本 様
販売店	有限会社 長野医科器械		ご担当 藤原 様
納入年月日	平成 24 年 9 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴		Ver. 0107/To1.A	
異常履歴 特=無し			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 554
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 07/ ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
給水フィルター	☐	排水フィルター	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。			

装置 情報	交換後運転回数： 29	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 9	殺菌/消毒+アル： 138
	リークチェック： 0	自己洗浄： 4	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	バルブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 10 月 27 日

ご署名 湯本 貴英 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 H28.10.27	作業者 H28.10.27
--------------------	------------------