

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 8 月 28 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2019 年 8 月 19 日		作業時間： Hr
顧客名	上野歯科医院 様	TEL： 043-278-8871	
所在地	千葉県千葉市美浜区真砂4-17-5	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2018 年 10 月 1 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100274	運転回数： 996	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー26 停電			
原因			
・サーキットプロテクタ誤作動 → サーキットプロテクタ品質不良			
処置、作業内容			
・サーキットプロテクタ交換（対策品）			
・各種調整 運転確認			
・定期点検実施			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・サーキットプロテクタ		2		
2	・ドアバッキン		1		
3	・エアフィルター		1		
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 8 月 28 日

ご署名 上野正志



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/08/19 富田	環PJ '19/08/19 鈴木

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称	上野歯科医院	検査番号	100274	点検実施日	2019年8月19日	承認印	
	住所	千葉県千葉市美浜区真砂4-17-5	運転回数	996/2158 回	点検実施者	IHIアグリテック 鈴木		
	納入場所		サービス形態	定期メンテナンス	モリタ担当者	モリタ千葉営業所		

計装(安全)

- ☒ 圧力計ゼロ設定
- ドア
- ☒ ブラケットの脱落状況確認
- ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
- ☒ ドアセンサ作動確認
- ☒ ドアロックセンサ作動確認
- ☒ ドアロックピンの動きの確認
- ☒ 内蓋のキズ・汚れ
- ☒ 運転中のドアからの水漏れ

傷体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 缶内温度センサの汚れ
- ☒ トレー・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ
- ☒ 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

- ☒ テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ☒ 給気弁の動作確認
- ☒ 排気弁の動作確認
- ☒ 真空・排気弁の動作確認
- ☒ 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 回水弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 排水コネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(缶内)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ 蒸気発生器からの漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタットの設定温度確認
- ☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ 蒸気発生器からの漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタットの設定温度確認
- ☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブの折れ、裂けの確認
- ☒ 蓋の損傷・割れ
- ☒ フロートセンサー(L)の作動確認
- ☒ フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動確認

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ SD基板の腐食の確認

外装・設置

- ☒ 設置場所の水平確認
- ☒ 本体のフロント側が高いことの確認
- ☒ アジャスタの緩み・破損の確認
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- ☒ SDカードへの書き込みの確認

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ コンバクトPCDIによる判定
- ☒ TESTバキューム
- ☒ 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認

合 ・ 否

インジケータ貼り付け

【  】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量
・ドアパッキン	1
・エアフィルター	1
・サーキットプロテクター	2

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030