

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300058
作業年月日	平成 28 年 9 月 14 日	作業時間： 2 Hr
顧客名	稲里生協クリニック 様	TEL： 026-286-1500
所在地	長野市稲里町2-17-8	ご担当 安藤 様
販売店	中日本パナソニック株式会社 長野事業所	ご担当 小林 様
納入年月日	平成 25 年 8 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/13 ~ 7/16 排水注意 (E111) Ver. 0204 / T02BV
9/4 エアライン低圧異常 (E104) → 排水時間 1分50秒程

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施、排水フィルタ内清掃

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 437
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
給水フィルタ	☒	排水フィルタ	☒ フィルタ=清掃

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・機械本体動作異常ありません。排水フィルタ内清掃後の排水時間は、1分30秒程
・酸素ポンプの残量バリエーション、適宜ポンプの交換をお願いします

装置 情報	交換後運転回数： 614	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1209	殺菌/消毒+アル： 658
	リークチェック： 1849	自己洗浄： 667	アルコール単独： 5	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	バリエーション		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

平成28年 9月 14 日

安藤 恵子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.9.14	H28.9.14