

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28年 9月 23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100788
作業年月日	平成 28年 9月 23日	作業時間：1.5 Hr
顧客名	峯村医院 様	TEL：026-287-6172
所在地	長野市若穂川田 1684-2	ご担当 様
販売店	(株) Xデイエオ	ご担当 高橋 様
納入年月日	平成 25年 7月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	・機械本体左側(座)に水たまりができています。 異常履歴 特になし ・機械本体内に水は溜まりません																																																
不具合原因、作業内容	保守点検作業実施																																																
点検項目	<table><tr><td>フタロック</td><td>正常 ☒</td><td>殺菌槽 LED</td><td>正常 ☒</td></tr><tr><td>酸素ライン</td><td>正常 ☒</td><td>エアライン</td><td>正常 ☒</td></tr><tr><td>アルコールライン</td><td>正常 ☒</td><td>オゾン水濃度計動作</td><td>正常 ☒ バリス数 483</td></tr><tr><td>オゾンセンサ</td><td>正常 ☒</td><td>排水栓、排水ライン</td><td>正常 ☒</td></tr><tr><td>給水ライン</td><td>正常 ☒</td><td>細管送水ライン</td><td>正常 ☒</td></tr><tr><td>濃度計流量</td><td>正常 ☒</td><td>排気ライン</td><td>正常 ☒</td></tr><tr><td>水位センサー</td><td>正常 ☒</td><td>オゾン濃度</td><td>正常 ☒ 履歴 0.70 ppm</td></tr><tr><td>水漏れ確認</td><td>正常 ☒</td><td>異常音、振動</td><td>正常 ☒</td></tr><tr><td>清掃</td><td>正常 ☒ 清掃 ☒</td><td>電源コード</td><td>正常 ☒</td></tr><tr><td>トレー</td><td>正常 ☒</td><td>殺菌チューブ類</td><td>正常 ☒</td></tr><tr><td>殺菌槽コネクタ</td><td>正常 ☒</td><td>マニホールド周辺チューブ</td><td>正常 ☒</td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td></td><td>☐</td></tr></table>	フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バリス数 483	オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm	水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒	トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒		☐		☐
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒																																														
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒																																														
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バリス数 483																																														
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒																																														
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒																																														
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒																																														
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm																																														
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒																																														
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒																																														
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒																																														
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒																																														
	☐		☐																																														
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	異常ありません。酸素ポンプ流量が少なくなっています。早めには交換をお願いします。																																																

装置情報	交換後運転回数：360	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒：78/	殺菌/消毒+7L：204
	リークチェック：0	自己洗浄：3	7L単独：1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィル		☒	1	アルコール消毒用スポンジ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	バリス		☒	1

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 峯村 善保	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
28.9.23	28.9.23