


点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 1 月 18 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 1 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	海岸歯科室 様	TEL： 043-278-7318	
所在地	千葉県千葉市美浜区高洲3-14-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090030	運転回数： 6837	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー25 滅菌温度高温異常			
・エラー30 缶体真空異常			
原因			
・給水ポンプフィルターへの異物の詰まりによる給水不足（エラー25）			
・ドアパッキン劣化（エラー30）			
処置、作業内容			
定期交換部品交換			
各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

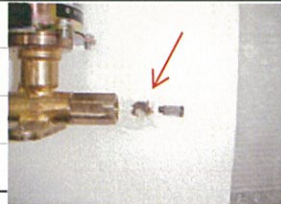

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

永田

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者



お客様	名称 海岸歯科室		製造番号 13090030	点検実施日 2019年1月7日	「」承認印 安田
	住所 千葉県千葉市美浜区高洲3-14-6		運転回数 6837	点検実施者 IHIアグリテック 安田	
	納入場所		サービス形態 定期メンテナンス	モリタ担当部署 モリタ千葉営業所	

計装(安全)

☒ 圧力計O点指示誤差

ドア

- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

午休

- ✓ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ✓ 滅菌温度センサの汚れ
- ✓ 網カゴの破損、汚れ
- ✓ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ✓ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ 給気弁の作動状態・漏れ
- ✓ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ✓ 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- ✓ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ストレーナーの汚れ
- ✓ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ✓ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ✓ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ✓ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ✓ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ✓ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ フランジパッキン漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ✓ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✓ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ✓ 水漏れ・異常音の確認
- ✓ 真空到達度

給水タンク

- ✓ 給水タンクの損傷・漏れ
- ✓ 下部給水弁の漏れ
- ✓ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ✓ タンクの汚れ・漏れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 行程表示LEDの点灯
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ✓ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ✓ 本体の水平確認・基準傾き内
- ✓ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ✓ キズ・汚れ
- ✓ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ✓ 運転プログラムの確認
- ✓ 入力・出力確認
- ✓ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアークリーターのつまり、汚れ

性能評価

✓	ケミカルインジケータによる判定
✓	リークチェック

インジケータ貼り付け

運転確認
○ 合 ・ 否

[REDACTED]

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030